

# LapaSta® (ラパスタ) 仕様書

## 【使用方法】

1. レバーが開放（上に向けた状態）された状態になっているか確認して下さい。
2. 接地面に油分など無いことをご確認していただき、吸盤を接地面に置いてください。
3. ラパスタを片手で軽く握り、もう一方の手でレバーを下ろしてください。ラパスタが接地面に固定されます。
4. アームを適当な角度にしてから、アームがぐらつかないようにボールヘッドのネジを絞めて固定してください。

## 【仕様】

- ・製品名：LapaSta®
- ・品番：ラパスタ
- ・サイズ：高さ：210mm 台座直径：70mm 重さ：1本 175g

## 【諸注意】

1. アームをネジで固定した後は、本体を強い力で角度などを変えるとネジが利かなくなります。
2. 台座底辺についている吸盤はポリ塩化ビニール製です。必要がない場合以外は触れないでください。人の汗などに弱い材質ですので劣化の原因となります。
3. 本体を設置する面はアルコールなどで油分などないようにふき取ってから設置してください。また、ざらついた面には設置できません。
4. 練習用持針器挿入口のゴムを傷つけると裂けることがあります。（ゴム膜は有償で交換ができます）
5. 吸盤を真空状態で設置している場合、強引に本体を動かそうとすると本体もしくは接地面が破壊される可能性があります。吸盤の上にあるレバーを解除してから本体を動かすようにしてください。
6. 練習用持針器挿入口に練習用持針器を挿入したままにしておくと、練習用持針器が落下し破損する可能性があります。使用されない場合は、練習用持針器を安定した場所へ置いてください。

## 【LapaSta® ラパスタ部位名称】



### 【問合わせ】

日本高分子技研株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3-2-14

日本橋KNビル4階

電話：03-5201-3735

E-Mail：inoue@jptc.co.jp