

仕様書

CNK 吻合練習用モデル



Product No CNK 吻合練習用モデル

モデル大	ワイヤー付き	φ23×φ15×40
モデル中	ワイヤー付き	φ15×φ10×30
モデル小	ワイヤー付き	φ8×φ5×25
台座		123g W 75mm× D 75mm× T 8mm



セット モデル大 2本 モデル中 2本 モデル小 2本 台座 1台

【ご注意】

- ・臨床では使用できません
- ・モデルのワイヤーを何度も折り曲げると破断します
- ・モデルからワイヤーを引っ張ると取れることがあります
- ・ワイヤー末端は身体を傷つけることがありますので、扱いには注意願います
- ・ワイヤー固定ネジをドライバーで固定する際はネジ山を破損しないように注意願います
- ・モデルを触れた手で食材を触れないようしてください
- ・使用しない時はワイヤー固定ネジを締めてください 傾けるとワイヤー挿入口が落下します
- ・子供の手の届かないところへ保管願います
- ・犬や猫などペットがモデルを口にしないように注意願います

【ご使用方法】

1. ワイヤー固定ネジを緩めてください
2. ①のワイヤー挿入口にモデルのワイヤーを奥まで挿入してください
3. ワイヤーを持ちながら②のワイヤー固定ネジを締めてワイヤーを固定してください
4. ③のようにワイヤーを曲げて吻合練習に適した角度に設定してください
5. 使用後はワイヤー固定ネジを緩め、ワイヤーを外してください
6. ワイヤー挿入口にワイヤーがない状態でワイヤー固定ネジを締めてください

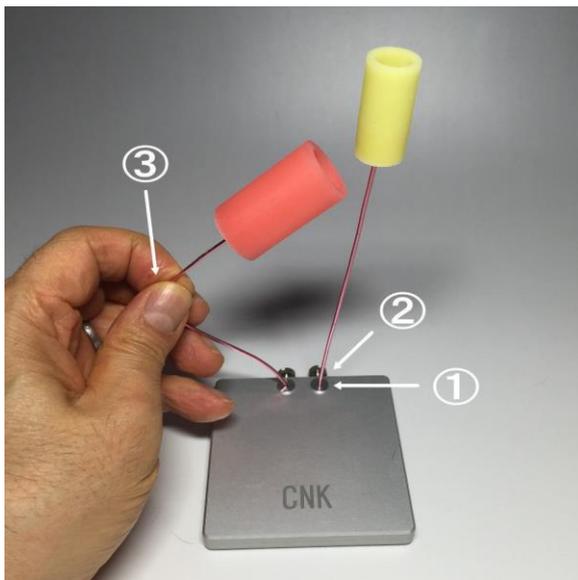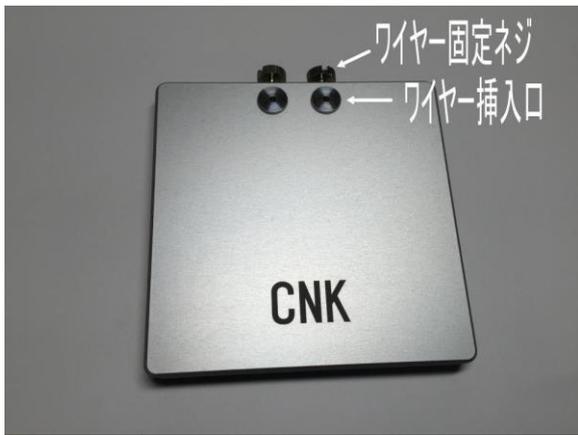

JPTC

Exporter ICST Corp 2nd Floor, S4 Tower, 5-17-1 Kamiochiai, Chuo-ku Saitama-shi, Saitama, Japan
Phone: +81-48-857-8026 E-Mail : info@icst.jp



JAPAN POLYMER TECHNOLOGY