

仕様書

子宮モデル Ki-TLH


Product No	子宮モデル Ki-TLH
サイズ	W 900mm D 600mm H 1200mm
重量	220g
材料	シリコン製
付属	吸盤

【ご注意】

- ・臨床では使用できません
- ・基じん帯を強引に引っ張ると子宮モデルから剥がれます
- ・基じん帯に切れ目を入れると裂けることがあります
- ・動脈を強引に引っ張ると子宮モデルから剥がれます
- ・吸盤は人の汗などに弱い材質なので必要がない場合以外触れないでください。
- ・吸盤が付く表面がクリアーな面に設置してください
- ・装着面が凹凸や艶消し状態の場合、設置はできません
- ・薬品などをつけると材料が劣化することがありますので、使用後はケースへ入れてください
- ・吸盤で固定された状態で子宮モデルを強引に引っ張らないでください
- ・直射日光の当たらない場所で保管してください
- ・乗用車など車の中に入れて保管すると劣化の原因となります

【ご使用方法】

1. 子宮の裏面にあるアクリル丸板に吸盤を押してつけて下さい
2. 設置面にパウダー、オイル、酸などの薬品が付いていないことを確認してください
3. 子宮モデルの裏面にある吸盤を光沢面に付けてください
4. 膣断端練習で切れた面はハサミなどで薄く切って新しい面を出してください
5. 使用後は、吸盤と設置面に爪を入れることで吸盤が取れます
6. 付属のケースに収納して直射日光の当たらない場所に保管してください

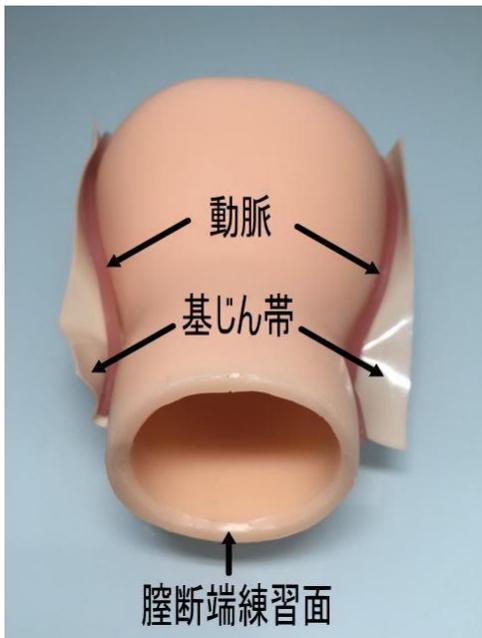

 日本高分子技研株式会社

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14
日本橋KNビル4階
電話：03-5201-3735
URL <http://www.jptc.co.jp>
Facebook <https://www.facebook.com/japanpolymer>
お問合せ：井上雅司 inoue@jptc.co.jp



JAPAN POLYMER TECHNOLOGY