


仕様書

CNK ステンレス製練習用レシーバー

製品番号 EYP2009F-CNK フラミンゴタイプ

注: 洗浄ポートなし

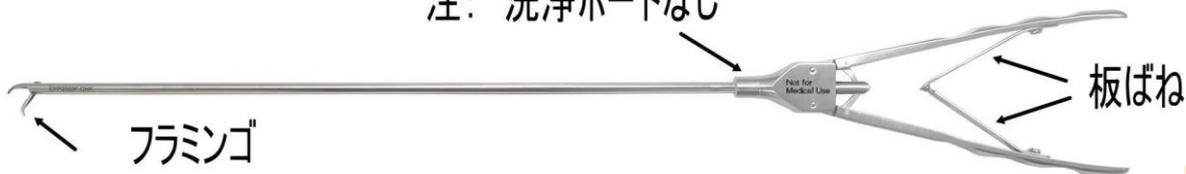

製品番号 EYP2009D-CNK メリーランドタイプ

注: 洗浄ポートなし



材質ステンレス製 SUS630

有効長 330mm

重量 190g

ラチェット機能なし

洗浄ポートはありません 滅菌はできません

指の負担を低減したストレートハンドル


ハンドルの根元には「Not for Medical Use」と記載しています

【ご注意】

- ・臨床では使用できません 臨床で使用された場合、弊社は責任を一切負いかねます
- ・滅菌はできません
- ・保管する場合は他の持針器などを重ねるなどしないでください
- ・子供の手の届かないところで保管をしてください
- ・ウェットラボでの使用はできません

【板バネの調整方法】

板バネはデリケートな部品です。何度もやると調整はできなくなります。

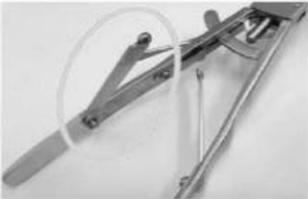	ハンドルの内側にあるこの板バネを調整します
	矢印の方向に板バネを押してください
	上記の板バネを押しながら、丸で困っている板バネを横にずらしてかみ合わせを外します
	柔らかくする場合：矢印の方向へ板バネを押す 硬くする場合：矢印とは逆の方向へ板バネを押す

JPTC

 日本高分子技研株式会社

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14
日本橋KNビル4階
電話：03-5201-3735
URL <http://www.jptc.co.jp>
Facebook <https://www.facebook.com/japanpolymer>
お問合せ：井上雅司 inoue@jptc.co.jp



JAPAN POLYMER TECHNOLOGY